



CREATE IT



LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN AUTOMÁTICAS

NAKANISHI INC. 

www.nsk-inc.com

700 Shimohinata Kanuma-shi Tochigi 322-88666, Japón
Tél. : +81 (0)289 64 3380 - Fax : +81 (0)289 62 5636

NSK Dental Spain SA

www.nsk-spain.es

C/ Módena, 43 El Soho - Európolis 28232 Las Rozas - Madrid - España
TEL : +34-91-626-61-28 - FAX : +34-91-626-61-32

iCare

iCare marca un antes y un después en los sistemas de mantenimiento de piezas de mano. Con su cuerpo sofisticado y compacto, pone a su disposición facilidad de uso y múltiples funciones para lograr una limpieza y lubricación completas. El volumen de solución óptimo se programa en función del tipo de pieza de mano: basta con pulsar un botón para iniciar el mantenimiento. El sistema de limpieza de portafresas conserva estas piezas impolutas, mientras que el modo selección de purga le permite modificar la duración de esta operación, dependiendo de la situación, para conseguir un mantenimiento realmente integral. iCare, con su cuerpo sofisticado y compacto, también ahorra espacio y se integra a la perfección en su entorno de trabajo.

VENTAJAS

- Volumen de solución programado según el tipo de pieza de mano (de alta o de baja velocidad).
- Limpieza y lubricación en profundidad con un sencillo funcionamiento.
- Función de limpieza de portafresas que garantiza la limpieza y lubricación en profundidad.
- Modo selección de purga, sinónimo de eliminación total del exceso de aceite.
- Depósito de aceite integrado de gran capacidad (1,2 litros), que reduce la necesidad de tener que rellenarlo.



LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN AUTOMÁTICAS

VOLUMEN DE SOLUCIÓN PROGRAMADO SEGÚN EL TIPO DE PIEZA DE MANO

El volumen de solución se programa en función de si la pieza de mano es de alta o baja velocidad, garantizando una lubricación precisa y en profundidad con sólo tocar un botón.



PANEL DE CONTROL ERGONÓMICO Y DE FÁCIL LECTURA


Funcionamiento sencillo: la lubricación se activa con un solo toque.

PIEZAS DE MANO DE BAJA VELOCIDAD



Las piezas de mano de baja velocidad presentan sistemas de engranaje que hacen indispensable que la solución penetre hasta el último resquicio. El sistema de rotación de NSK garantiza un flujo óptimo de aceite a los componentes internos de todas las piezas de mano de baja velocidad.

PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD

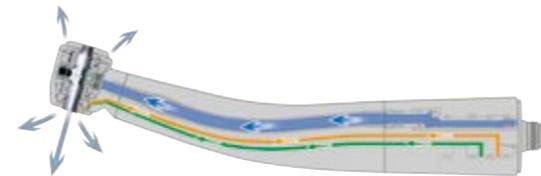

iCare limpia a conciencia y meticulosamente los componentes de piezas de mano de alta velocidad.



FILTRO PARA CABEZAL HP QUE IMPIDE LAS FUGAS DE BRUMA

El Filtro para cabezal HP ha sido diseñado para absorber la bruma que genera la pulverización, lo que impide las fugas.



FÁCIL DE LIMPIAR

La tapa frontal de iCare puede extraerse por completo para una limpieza rápida y fácil del sistema.



DEPÓSITO DE SOLUCIÓN

El depósito de solución de iCare de gran tamaño tiene una capacidad de 1,2 litros, lo que le permite llenarlo de una vez con una botella de 1 litro de solución de mantenimiento, reduciendo así la necesidad de tener que rellenarlo con frecuencia. Gracias a la boquilla que incorpora, puede rellenarse de forma limpia y fácil.

COMPATIBLE CON PIEZAS DE MANO DE NSK Y DE OTRAS MARCAS

Permite conectar piezas de mano de baja velocidad de NSK y de cualquier otra marca al acoplamiento que se facilita. Las piezas de mano de NSK requieren un adaptador PTL. Existen adaptadores para conectar directamente la mayoría de las demás marcas de piezas de mano de alta velocidad.



MODO SELECCIÓN DE PURGA

Una vez lubricado, puede elegir la duración de purga gracias a sus tres modos distintos.



FUNCIÓN DE LIMPIEZA DE PORTAFRESAS

La función de limpieza de portafresas elimina por completo de esta pieza la suciedad y el polvo generado por las labores de corte.

FUNCIONAMIENTO SEGURO CON DIVERSAS FUNCIONES DE ALARMA

El LED de alarma garantiza un mantenimiento seguro que le avisa de distintas situaciones, como cuando la cantidad de solución no es adecuada o no se ha cerrado la tapa frontal.



LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN AUTOMÁTICAS



SOFISTICADO Y COMPACTO

En su búsqueda de la facilidad de uso insuperable, NSK ha provisto iCare de la función de mantenimiento automático de hasta cuatro piezas de mano a la vez. Además, iCare ha sido diseñado para que su configuración resulte de lo más sencilla y para ahorrar espacio: podrá instalarlo prácticamente en cualquier parte.



JUEGOS COMPLETOS para iCare

Dos puertos estándar + dos puertos de rotación

MODELO : REFERENCIA :
iCare C2 Type (230V) Y1002787



Un puerto estándar + tres puertos de rotación

MODELO : REFERENCIA :
iCare C3 Type (230V) Y1002788



COMPONENTES

- Unidad iCare
- Cable de alimentación
- Aceite de mantenimiento para iCare (1 litro)
- Juego de filtros de bruma
- Hoja absorbente de aceite
- Manguera de aire
- Boquilla para la botella de aceite

ESPECIFICACIONES

- Fuente de alimentación : AC 100-240 V 50/60 Hz
- Presión de aire : 0,5-0,6 MPa (5,0-6,0 kgf/cm²)
- Peso : 7,0 kg (type C2 / type C3)
- Dimensiones (mm) : W280 x D240 x H350
- Capacidad del depósito de solución : 1 200 ml

* Solo se puede conectar al tipo Midwest de 4 vías.
* Precisa conducción de aire (5,0-6,0 kgf/cm²)

ADAPTADORES iCare

MODELO :	REFERENCIA :	
Adaptador PTL	Z257010	• Para piezas de mano NSK de alta velocidad para acoplamiento PTL-CL-4HV-T
Adaptador B2/M4	T904	• Para piezas de mano de alta velocidad Borden 2 vías
Adaptador KV	Z257020	• Para piezas de mano KaVo de alta velocidad para acoplamiento MULTIflex LUX
Adaptador SR	Z257023	• Para piezas de mano Sirona de alta velocidad para Quick Coupling
Adaptador WH	Z257021	• Para piezas de mano W&H de alta velocidad para acoplamiento Roto Quick
Adaptador BA	Z280022	• Para piezas de mano Bien-Air de alta velocidad para acoplamiento Unifix

Consulte con su distribuidor qué adaptadores permiten montar piezas de mano de otros fabricantes

ACEITE DE MANTENIMIENTO Y RE-PUESTOS

MODELO :	REFERENCIA :	
Aceite Mantenimiento para iCare 1 Botella de 1 Litro	Z016130	
Aceite Mantenimiento para iCare Pack de 6 Botellas	Y1002783	
Set de Filtros de vapor Pack de 12	Y900159	
Hoja Absorbente de Aceite Pack de 10	U433135	
Filtro de aire	U508352	
Boquilla de limpieza	Z257301	
HP Cabeza de filtro Pack de 200	U1120118	

KaVo® y MULTIflex® LUX son marcas comerciales registradas de Kalttenbach & Voigt GmbH & Co. Sirona® es una marca registrada de Sirona Dental Systems GmbH. W&H® es una marca registrada de W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH. Bien-Air® y Unifix® son marcas registradas de Bien-Air Dental S.A